


Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold) - CE

zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben; CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration

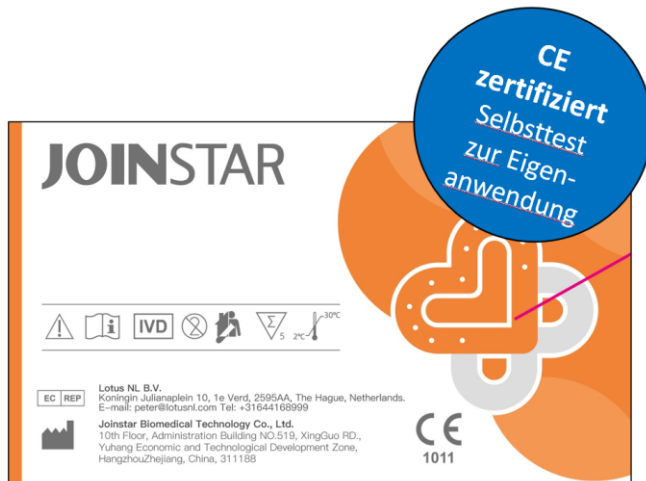

Produkt

Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold) – CE ist CE-zertifiziert für die Eigenanwendung.

Technische Daten

1, 5, 10 oder 25 Stück pro VPE

Verwendungszweck

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe mit einem Anti-SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat auf dem Polster, das mit Partikeln beschichtet ist und dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf

das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SARS-CoV-2-Antikörper in der Nachweiszone. Wenn die Probe SARS-CoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARSCoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie immer eine farbige Linie, die anzeigt, dass ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden hat.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Extraktionspuffer
3. Steriler Tupfer (für die Probenentnahme)
4. Gebrauchsanweisung

Lagerung und Haltbarkeit

1. Der Test ist 2 Jahre haltbar, wenn alle Teile in versiegelten Beuteln bei +2°C bis 30°C gelagert werden und die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.
2. Der Test sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel aufbewahrt werden. Frieren Sie den Test nicht ein und verwenden Sie ihn nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✦ Anterior-nasal (kurze Nase!)
- ✦ Spezifität: 99,2% Sensitivität: 96,1%
- ✦ Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- ✦ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ✦ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- ✦ CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold) - CE:

Corona-Schnelltest mit anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Spezifität	Sensitivität	Lagerung	Packungsgröße
Joinstar COVID-19 Antigen-Schnelltest (Colloidal Gold) - CE	CE als Selbsttest zur Eigenanwendung	anterior-nasale (kurze Nase!) Proben	99,2 %	96,1%	Bei Raumtemperatur	1, 5, 10 oder 25 Tests pro VPE

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA

HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203